
	DEFİBRİLATÖR CİHAZININ KULLANIM TALİMATI			
DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
MC.TL.01	01.01.2024	0	-	Sayfa:1/1

- 1.AMAÇ:** Tıp Merkezinde defibrilatör cihazının düzgün, etkin ve pratik bir şekilde kullanımını sağlamak.
- 2. KAPSAM** Sağlık personelinin kapsar.
- 3. KISALTMALAR**
- 4. TANIMLAR**
- 5. SORUMLULAR** Sağlık personelleri
- 6. FAALİYET AKIŞI**
 - 6.1** Hasta sırt üstü yatırılır.
 - 6.2** Hasta EKG kablolarının bağlama yerlerine jel sürülür.
 - 6.3** Cihazın açma kapama düğmesi açık konuma getirilir.
 - 6.4** Cihaz istenen joule değerine getirilir.
 - 6.5** Kaşıklara jel sürülür ve şarj olana kadar beklenir.
 - 6.6** Kaşıklar hastanın uygun yerleri hariç temas ettirilmez.
 - 6.7** Kaşıkların üzerindeki düğmelere aynı anda basılır ve uygulama yapılır.
 - 6.8** Uygulama bitiminde cihaz kapatılır, uygun dezenfektan maddelerle temizlenir.
 - 6.9** Günlük şarj olup olmadığı cihaz açıp kapatılarak batarya göstergesinden kontrol edilir.
 - 6.10** Şarj bitince güç kablosu toprak hatlı prize takılır, şarj dolu konuma gelince güç kablosu **prizden çekilir.**
- 7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

HAZIRLAYAN	İNCELEYEN	ONAYLAYAN
KALİTE BİRİM SORUMLUSU	KURUM MÜDÜRÜ	BAŞHEKİM