
 URARTU GÖZ	PULSE OKSİMETRE KULLANIM TALİMATI			
DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
MC.TL.04	01.01.2024	0	-	Sayfa:1/1

1.AMAÇ: Aletin doğru ve verimli kullanılmasını sağlamak

2. KAPSAM

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR Doktor, hemşire, ebe ve acil tıp teknisyenleri

6. FAALİYET AKIŞI

6.1 Monitörün fişi prize takılır.

6.2 Monitör açılır.

6.3 Algılayıcı uzatma kablosunun bağlantısını SPO2 modülünün üstündeki SPO2 soketine takılır.

6.4 Algılayıcı hasta parmağının uygun tarafına ve hastanın parmağına uygun bir prob takılır.

6.5 Algılayıcının takıldığı parmak tırnağında oje ve kına olmaması gereklidir.

6.6 Takılan algılayıcının ışıklı kısmı tırnak üstüne gelmelidir.

6.7 Uygulanan parmakta dolaşım bozukluğu olup olmadığı kontrol edilir.

6.8 Takılan parmak soğuksa biraz ısıtıp daha sonra algılayıcı takılmalıdır.

6.9 Çıkan sonuç kaydedilir ve gerekiyorsa algılayıcı sürekli ölçüm yapmak için parmakta bırakılır.

6.10 Uygun şekilde temizliği yapılır ve kaldırılır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN	İNCELEYEN	ONAYLAYAN
KALİTE BİRİM SORUMLUSU	KURUM MÜDÜRÜ	BAŞHEKİM