
 URARTU GÖZ	EKG CİHAZININ KULLANIM TALİMATI			
DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
MC.TL.02	01.01.2024	0	-	Sayfa:1/1

1.AMAÇ EKG cihazlarının verimli kullanımını sağlamak.

2.KAPSAM Sağlık personelinin kapsar.

3.KISALTMALAR

4.TANIMLAR

5.SORUMLULAR Sağlık Personelleri

6. FAALİYET AKIŞI PLUS MED-Pm ECG-300G Marka EKG Cihazı

6.1 Cihazın fişi uygun şebeke voltajına (220 v topraklı) takılır.

6.2 Cihaz ON/OFF düğmesine 2 saniye basılı tutularak açılır

6.3 Hasta EKG çekimi için hazırlanır. Üzerinde metal varsa (bileklik vs) çıkartılır. Hasta sırtüstü sedyeye yatırılır. Hastanın göğsü açılır, çorapları çıkartılır.

6.4 EKG çekiminin kaliteli olması için gerekirse hastanın göğüs traşı yapılır.

6.5 Elektrotların yerleştirileceği yerlere alkol ya da EKG jeli uygulanır, elektrotlar yerleştirilir.

6.6 EKG çekimine başlanmadan önce hastaya rahat nefes almasını ve hareket etmemesi söylenir.

6.7 Çekim yapmak için EKG cihazının üstündeki Print düğmesine basılır ve EKG çekme işlemine başlar.

6.8 Çekim bittikten sonra hastadan elektrotlar çıkarılır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN	İNCELEYEN	ONAYLAYAN
KALİTE BİRİM SORUMLUSU	KURUM MÜDÜRÜ	BAŞHEKİM